

EBSA 20 嬰兒秤使用說明書

技術參數

- 工作溫度：10~40℃
- 環境濕度：< 80%
- 最大容量：20kg
- 分度值：5g
- 供電方式：4 號乾電池
- 電源不足：Loo
- 錯誤指示：ERR
- 單位轉換：kg 克 或 lb 磅
- 自動關機 5 分鐘未使用即自動關機
- 自動記憶功能 (MEM)

功能設置

ON/ZERO：按下(ON/ZERO)鍵開機並進行秤重。再次按下可以歸零，使秤量回到零點。
按住(ON/ZERO)不放 3~5 秒即關機。

MODE：秤重量單位轉換按鍵，在未鎖定狀態下按此鍵進行 KG 公斤和 LB 磅的轉換。

MEM：當正常秤量時，如果想保存當前秤量數據此時可按下此鍵，顯示器右下角出現『MEM』標示符，表示當前鎖定數據已被存取。如對秤量數據不準備記憶，可不操作此鍵。

操作方法

☆ 放入電池，按下『ON/ZERO』鍵開機，秤自檢後顯示為零 0.000。

☆ 輕輕將嬰兒放在秤盤上，數值將閃爍幾秒後顯示秤重結果。如果嬰兒在秤盤上不被抱走停留五分鐘後秤會自動關機。

☆ 嬰兒離開秤盤後，數值閃爍幾秒後自動回零，若未再次使用稍後將自動關機。

☆ 如果保存當前秤量值，請在數據閃爍時按『MEM』。

注意事項

1. 為確保小孩的安全請把秤在置在平坦硬實表面上。
2. 當秤出現『Loo』應立即更換電池。
3. 為確保秤的正常使用應保持秤的清潔。
4. 若長期不使用電池，應將秤內的電池取出，以免電池漏液而損壞。
5. 為確保正確秤量，及安全請把小孩放於秤盤的中央位置。
6. 嚴格禁止超載 (嚴禁重於 20KG)